

# INICIO

## 1 ASPECTOS BÁSICOS DEL G7


El G7 muestra la información de glucosa en los dispositivos de visualización.

### Sensor y aplicador



- Durante la configuración, le mostraremos cómo usar el aplicador para insertar el sensor incorporado debajo de su piel.
- El sensor envía una medición de glucosa a los dispositivos de visualización cada 5 minutos.
- El sensor dura hasta 10 días con un periodo de gracia de 12 horas.

### Parque protector

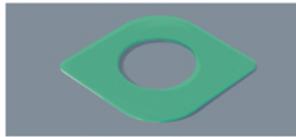

Después de insertar el sensor, puede usar el parche protector para ayudar a mantener el sensor en su cuerpo.

### Instrucciones

Durante la configuración, use las instrucciones de inserción del sensor que se encuentran en la aplicación o consulte *Inserción del sensor* a continuación.

### Conecte hasta dos dispositivos de visualización

Reciba información sobre su glucosa en el teléfono, el receptor Dexcom o ambos. Para obtener información sobre los dispositivos inteligentes y sistemas operativos compatibles, visite: [dexcom.com/compatibility](http://dexcom.com/compatibility)

## 2 CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

Debe tener acceso seguro a Internet durante la configuración.

(Para configurar el receptor, consulte las instrucciones del producto en la caja del receptor).

### 1. Primeros pasos

- Escanee el código QR o vaya a App Store o Google Play para descargar la aplicación Dexcom G7.

Android



Apple



Dexcom G7

★★★★4.3K

- Abra la aplicación.
- Ingrese o cree una cuenta.

### 2. Configuración

- Siga las instrucciones de la aplicación para configurarla.
- Para obtener instrucciones sobre cómo insertar el sensor, siga las instrucciones de la aplicación o los pasos de *Inserción del sensor* a continuación.

- Después de insertar y emparejar, siga las pautas locales para desechar el aplicador y reciclar el empaque de Dexcom.

### 3. Adaptación del sensor

El temporizador de adaptación del sensor le indica cuándo comenzará a recibir mediciones y alertas.



### 4. Sesión del sensor

Vaya a *Guía del usuario de G7* para obtener más información.

Revise la información de seguridad en la *Guía del usuario de G7*. Todos los gráficos son representativos. El producto puede verse diferente.

# INSERCIÓN DEL SENSOR

## 1. Elija la ubicación del sensor según la edad

**¡IMPORTANTE!** Si usó sensores G6 en el abdomen, use sensores G7 en la parte posterior del brazo. Los niños de 2 a 6 años también pueden usar la parte superior de los glúteos.

### a. Niños de 7 años en adelante:

Pueden usarlo en la parte posterior del brazo.

### b. Niños de 2 años (24 meses) a 6 años:

Pueden usarlo en la parte posterior del brazo o la parte superior de los glúteos.

### Zonas a evitar:

- con piel floja o sin grasa suficiente para evitar los músculos y huesos
- que reciben golpes, presión o sobre las que se apoya mientras duerme
- que se encuentran a menos de 3 pulgadas de la zona de infusión o inyección
- cerca de la cintura o con irritaciones, cicatrices, tatuajes o mucho pelo


Para mantener el sensor conectado, consulte [dexcom.com/faq](http://dexcom.com/faq)

## 2. Limpiar y secar

- Lávese las manos con agua y jabón. Séquese.
- Frote la zona de aplicación con una toallita humedecida en alcohol.
- Espere hasta que se seque por completo.

## 3. Desensrosque la tapa

- No toque el interior del aplicador.
- No lo use si está roto o estaba abierto.

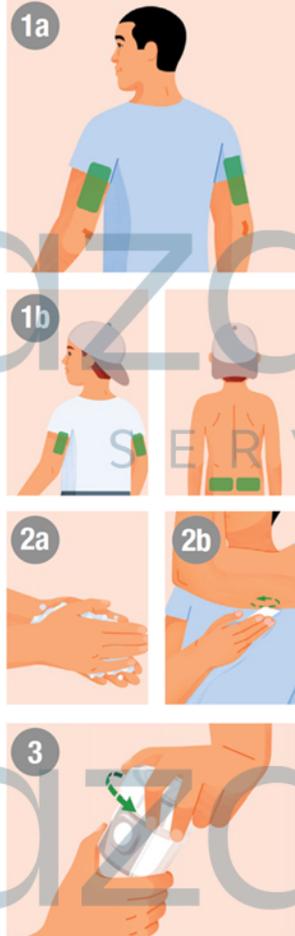

## 4. Use el aplicador para insertar el sensor

- Relaje los músculos cerca de la zona de aplicación.
- Presione y sostenga el aplicador firmemente contra la piel hasta que se ajuste la protección de seguridad transparente. Luego presione el botón en el lateral del aplicador.

## 5. Extraiga el aplicador

- Guarde el aplicador, ya que necesitará el código de emparejamiento.
- Vuelva a ponerle la tapa al aplicador.

## 6. Frote y presione

- Para que el parche se mantenga adherido a la piel:
- Frote el parche con firmeza 3 veces.
  - Presione con delicadeza la parte superior del sensor durante 10 segundos.

## 7. Aplique el parche protector

Debe aplicar el parche protector para mantener el sensor en su cuerpo. Se incluye con las instrucciones en la caja del sensor.

- Despegue con cuidado los dos revestimientos transparentes, de uno a la vez. No toque el área blanca de adhesivo.
- Use la lengüeta de color para colocar el parche protector alrededor del sensor.
- Frote el parche protector.
- Use la lengüeta para despegar el revestimiento de color.
- Frote el parche protector.
- Vuelva a la aplicación o al receptor para finalizar la configuración.



## CUIDADOS DEL PARCHE ADHESIVO

Cuanto más tiempo mantenga el parche seco y sin sudor durante las primeras 12 horas, más tiempo permanecerá adherido a la piel.

Cuando este se moje, en cuanto pueda seque delicadamente sin frotar. Si se despegas de la piel, recorte las partes despegadas y coloque una cinta adhesiva de grado médico.

## EXTRACCIÓN DEL SENSOR

Una vez finalizada la sesión del sensor, despegue el parche como si fuera una venda. Para hacerlo más fácil, siga estos consejos:

- Afloje el borde y empape el parche en aceites para el cuerpo, como aceite para bebé o un removedor de adhesivo para la piel (vea las instrucciones del producto antes de usar).

- Use toallitas que quiten el adhesivo de la piel para frotar la piel que queda expuesta a medida que retira el parche.
- Pruebe diferentes técnicas para retirarlo:

- Retire el parche lentamente, plegándolo sobre sí mismo, en la misma dirección del crecimiento del vello.
- Estire el borde suelto e introduzca sus dedos debajo del parche para retirarlo de la piel.

  
Dexcom, Inc.  
6340 Sequence Drive  
San Diego, CA 92121 USA  
1.888.738.3646  
[dexcom.com](http://dexcom.com)

AW-00080-902 Rev 001 MT-00080-902  
Rev Date: 10/2022